



対象月齢 0カ月～

■ 取りはずしてある部品は、本書をよく読んで取り付けてください。

※本取扱説明書では、鼻孔内の分泌液と粘液を以下、「鼻水」と記載します。

電池の使いかたを間違えますと、漏液、発熱、破裂のおそれがあり、ケガや事故、故障などの原因となりますので以下のことを必ずお守りください。

- 電池に記載されている危険・警告内容をよくお読みの上、ご使用ください。
- 電池の＋（プラス、マイナス）極を正しくセットしてください。
- 電池をショートさせたり、充電、分解、加圧、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 使用推奨期限の過ぎた電池は、使用しないでください。
- 使い切った電池はすぐに取りはずしてください。
- アルカリ乾電池を使用してください。マンガン乾電池、二次電池（充電式電池）、ニッケル系電池（オキシライド乾電池）などは使用しないでください。
- 外装ラベルがはがれたり、傷、へこみのある電池は使用しないでください。
- 長期間使用しない場合には、電池を取りはずしてください。
- 電源スイッチを入れたまま、電池の交換はしないでください。
- 使用済みの電池は地域の収集・回収方法に従い、処分してください。
- 電池から漏れた液体が目・皮膚についた場合は、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診断・治療を受けてください。
- 電池は火の近く、高温、多湿の場所での保管はしないでください。
- 電池はお子さまの手の届かないところに保管してください。万が一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の診断・治療を受けてください。
- 電池の入れ替えは、お子さまの手の届かないところで、大人のかたが行ってください。

ミストユニット

ミストタンク

ミストタンク

()

1

11

吸引ユニット



吸引カッパ

ポイント

 ミスト噴出口とお子さまの鼻孔のちょうど良い距離を把握するため、最初にご使用になる前に、ミストの噴霧量を確認しておくことをおすすめします。

- 4 お子さまの鼻孔にミストがあたるように離して噴霧する。
ミスト噴霧時は、本製品を立てて使用してください。連続でのミスト噴霧は10秒以内としてください。



ミスト噴出口とお子さまの距離が近すぎたり、長時間噴霧するとむせたり嫌がったりすることがあります。つどお子さまの様子を見ながら噴霧距離を調整してください。また、長時間使用するとお子さまの顔や服が濡れることがあります。顔や服にかかる水滴や垂れた鼻水は、タオルやハンカチでふき取りながら使用してください。



- 5 ミストタンクが空になったら水をたす。




水が入っていない状態で作動させると電池寿命が短くなります。

鼻水の吸引

- 1 吸引ノズル、吸引カップが本体に隙間なく正しく装着されていることを確認する。




誤って取り付けられていると正常な吸引ができなかったり、鼻水が漏れてくることがあります。

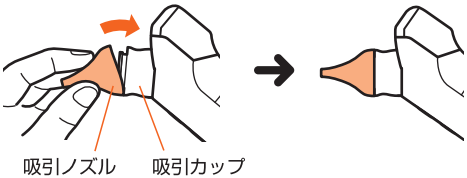

- 2 吸引ボタンを押す（吸引ユニットが作動する）



吸引ノズルの先端を無理に挿入しないでください。お子さまが嫌がる場合があります。

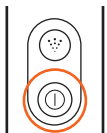


- 3 吸引ノズルをお子さまの鼻水に接触させ吸引する。



鼻水吸引中に吸引ボタンをOffにする場合は、本体を立てた状態で操作してください。


また、鼻水吸引中に吸引ノズルの角度や鼻水の粘度によっては吸引した鼻水が漏れてくる場合があります。鼻水が漏れてくる場合は、本体の角度を起こしてご使用ください。

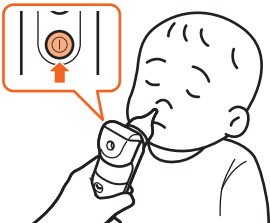

- 4 1回の吸引は3～5秒以内とし、つどお子さまの鼻から離して様子を見ながらこまめに吸引する。

吸引カップのMAXマークを超えそうな場合は、中断して洗浄してください。

吸引カップの容量を超えて吸引を続けると、吸引ノズルや本体の空気穴から鼻水が漏れてくる場合があります。

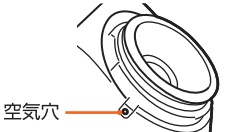

- 5 吸引ボタンをもう一度押し、停止させる。

吸引は約60秒で自動的に止まります。



ノズルの使い分けかた



鼻孔内や鼻孔から出てきた鼻水を吸引するときにご使用ください。

ノーマルノズル



新生児に使用する場合、操作者が初めて使用する場合は、鼻孔の奥に入りにくいストッパー付きノズルをご使用ください。

ストッパー付きノズル

お手入れ方法

使用後は、必ず吸引ノズル、吸引カップを洗浄してください。


ミストユニットのお手入れ方法

- 1 ふたをはずし、ミストタンク内に残っている水を捨てる。

ミストタンク内を水道水ですすいだ後は、よく乾燥させる。水分が残る場合は、綿棒などを使用してしっかりとふき取る。



使用後の水をそのままにすると雑菌などが発生するおそれがあります。

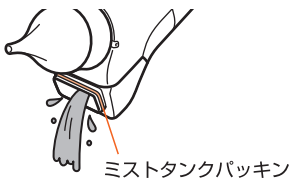

ミストタンクパッキン


- 2 ミストタンクの表面は乾いた布などでふく。

- 3 ミスト噴出口の汚れが気になる場合は、アルコールをつけた綿棒などでやさしくふく。

アルコール使用後はよく乾燥させる。



汚れが気になる場合、ミストタンクパッキンもはすして洗うことができます。

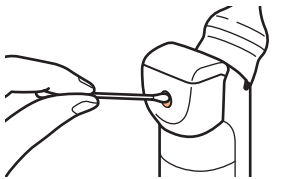


吸引ユニットのお手入れ方法

部品のはずしかた

- 1 吸引ノズルを吸引カップからはずす。



溜まった鼻水が飛散しないよう注意してはずしてください。鼻水が飛散し手や物についた場合は除菌することをおすすめします。

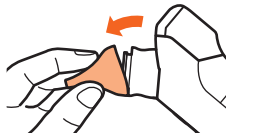

- 2 本体を支えながら吸引カップを持ち、矢印方向に回してはずす。

吸引カップ

ママーク


ロックマーク



汚れが気になる場合、吸引パッキンもはすして洗うことができます。吸引パッキンがはずしにくい場合は、つまようじなどの先の細いものを隙間に入れてはずしてください。先の細いもので吸引パッキンを切らないようにしてください。

つまようじ

吸引パッキン

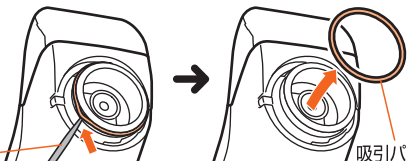

取りはずし時、洗浄時、各種パッキンをなくさないようにしてください。吸引パッキンがない状態で吸引をすると、空気が漏れてしまい、正常な吸引力が得られません。各種パッキンを取り付ける際には、ねじれないよう注意をしてください。部品と吸引パッキンの間にすき間がある状態で吸引をすると、空気が漏れてしまい、正常な吸引力が得られません。

部品の洗浄方法

- はずした部品（吸引ノズル・吸引カップ、ミストタンクふた、ミストタンクパッキン、吸引パッキン）を水道水またはぬるま湯、中性洗剤でよく洗う。各部品の凹凸部分もしっかりと洗う。
- 洗浄後は水分をよくふき取り、しっかりと乾燥させる。水分が残る場合は、綿棒などを使ってふく。
- 再度組み立てる際は、「部品のはずしかた」の逆の手順にて組み立てる。吸引カップはしっかりとロックされていることを確認する。
ママークとロックマークの位置がぴったりに合い、カチッと音になるまでしっかりと締めてください。



詳しくは **部品のはずしかた** をご覧ください。

本体側に鼻水を吸引してしまった場合



本製品は日常的に本体内部を洗浄することを想定しておりません。そのため使用時には本体内部に鼻水が入らないように注意してください。鼻水が本体内部に入ると、異音が生じたり、鼻水があふれ出たりするおそれがあります。

- 1 吸引カップ、吸引ノズルをはずし、洗浄した後、再度本体に取り付けてください。

- 2 吸引ノズルの先端を水道水またはぬるま湯につけ、そのまま吸引ボタンを押し、吸引ノズルに水を吸わせる。




吸った鼻水や水が本体空気穴から排出されます。吸った鼻水や水が周りに飛び散らないように、指や布などで水流をおさえてください。飛び出た水で、衣服などが汚れないように注意してください。

- 3 吸引が止まったら、吸引ノズルの先端を水面から出し、吸引ボタンを数回押しで、本体の中に溜まった水分が出なくなり、ゴボゴボと本体から異音が出なくなるまで吐き出す。（最後に水分を出し切るために本体を振ると効果的です。）粘り気が強い鼻水は一度で洗浄できないことがあるため、2～3の操作を繰り返す。



粘り気の強い鼻水を吸引した場合は、2～3の操作を5回程度繰り返してください。鼻水が固まり、故障の原因となります。

- 4 洗浄後は吸引ユニットをはずし、吸引口及び空気穴を乾いた布などでふく。空気穴に水が残っている場合、空気穴を下にして寝かせて乾燥させる。

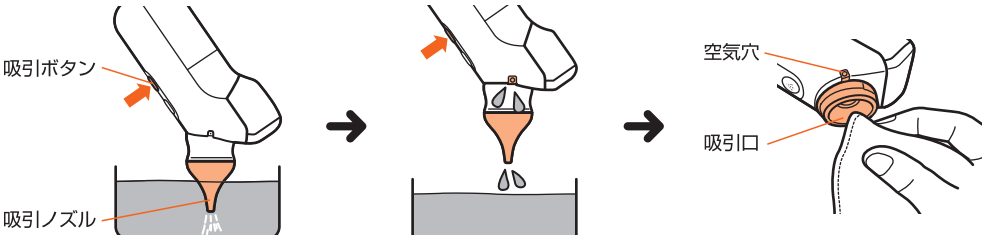

消毒・除菌について

部品名	材料の種類	耐熱温度	消毒・除菌方法		
			煮沸	電子レンジ	薬液
吸引ノズル	シリコンゴム	135℃	○	○	○
吸引カップ	PCTG	110℃	×	×	×
パッキン（2種）	シリコンゴム	135℃	×	×	×

吸引ノズルのみ消毒・除菌が可能です。

- 煮沸の際は、たっぷりのお湯を沸騰させた鍋に2～3分間入れ、煮沸してください。
- 電子レンジ除菌の際は、哺乳用品用の除菌用具をご使用ください。詳しくは、各用具の使用方法に従ってください。
- 薬液消毒・除菌の際は、家庭用向け哺乳用品用の用具や薬剤などをご使用ください。詳しくは、各用具や薬剤などの使用方法に従ってください。



- 3分以上煮沸しないでください。過度の煮沸は製品を早く傷めます。
- 少ないお湯や小さい鍋で煮沸すると、吸引ノズルが鍋肌に密着して変形するおそれがあります。
- 長時間薬液に浸したり、薬液の濃度が濃いと製品が劣化することがあります。
- 電子レンジ除菌および煮沸消毒後は、吸引ノズルが高温になります。ヤケドに注意してください。

品質保証書

ミスト付き電動鼻吸い器 NS13JP

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中製品の故障が発生した場合は、本書をご提示の上、当社コンシューマープラザ、または、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

保証規定

- 1度ご使用になった製品は、原則としてお取り替えできません。
- 保証期間内（お買い上げ日より1年間）に正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。電話にてお問い合わせの上、当社コンシューマープラザにお送りください。
- 保証期間内でも次のようなものは有料修理になります。
 - (a) プラスチック部品の自然劣化による変色。
 - (b) お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障および損傷。
 - (c) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障および損傷。
- (d) 本書に製品名、お買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (e) 本書のご提示がない場合。
- (f) 一般家庭以外で、業務用などに使用された場合。
- (g) 有料修理の場合に要する発送運賃。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。海外からの修理サービスはいたしかねます。
5. 製造中止後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できないこともあります。

製品名	ロットNo.	保証期間	お買い上げ日より1年間 (ただし保証規定による)
お客様 お名前	様	お買い上げ日	年 月 日
ご住所	〒	TEL	
販売店 店名		TEL	
住所			

修理メモ

- お買い上げ後、製品名、お買い上げ日、お客様名、販売店名をただちに記入願います。
- 領収書（レシート）を本書といっしょに保管してください。
- 万一故障が生じた場合は保証書をご提示してください。本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社コンシューマープラザ、またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。
- 品質保証書にご記入いただいた個人情報、故障・修理の確認、修理品の発送にのみ利用いたします。それ以外の用途には利用いたしません。

コンビ株式会社

■ ホームページ combi.co.jp
■ オンラインストア（部品購入窓口） combi.co.jp/store

製品・部品に関するお問い合わせ、修理などのご相談は、コンシューマープラザにて対応いたします。

コンシューマープラザ (Customer Service Center)
受付時間：9:30～17:00（土日祝日、年末年始を除く）
〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区約上新田271
TEL (048) 797-1000 FAX (048) 798-6109

*コンシューマープラザホームページ combi.co.jp/soudan

