

2005年9月13日

コンビ株式会社

社長:松浦 弘昌 資本金:29億9,192万円
(東証第一部: 7935)
〒111-0041 東京都台東区元浅草2-6-7
TEL: 03-5828-7666 FAX: 03-5828-7665

高齢者向け歩行補助車 自主回収のお知らせ 製品名称:「コンビキャリー スルーン」

コンビ株式会社の100%子会社であるコンビウェルネス株式会社(社長:関根邦夫 資本金:5,000万円)は、2005年2月末より販売を開始しました、高齢者の外出時の歩行を補助するシルバーカー「コンビキャリー スルーン」2種類を、SGマーク表示との不整合製品の混在の可能性があるため回収し、正規製品への交換等の対応をさせていただくことといたしました。

弊社では、生産済みの製品に対し定期的に検査を行っておりますが、このたび、「コンビキャリー スルーン」において、下記SG検査項目につき、結果値が基準に達しない製品が混在していることが判明しました。当該製品はSG基準適合品として販売しており、今回の検査にてSGマーク表示との不整合品の混在が分かったため、自主回収させていただきます。

SG試験「座面荷重転倒試験」 : 着座時の車体の安定性をテストする

座面の端部3箇所に上から垂直荷重をかけた時の安定性を確認する。座席シートの先端のかど(左右どちらかの角)に約60kg(正確には600ニュートン)の錘(おもり)を置いて車体の安定性を確認する。いずれかの車輪が地面から浮く(離れる)と不適合となる。定期検査の際「コンビキャリー スルーン」において、車輪の一つが浮く場合があり、不適合となった。

*「SG基準」とは:経済産業省の外郭団体である財団法人 製品安全協会が定める公的基準でこの基準に合格すると安全な製品と認証され、SGマークのシールを貼ることができる。

なお、車輪が浮いた状態でも車体そのものは安定しており、実使用においても転倒に至る可能性は極めて低く、着座への影響は無いと判断しています。

【1】対象製品

シルバーカー(高齢者用歩行補助車)「コンビキャリー スルーン」(2005年2月末発売開始)

製品名 : コンビキャリー スルーンHi (27,090円)

製品名 : コンビキャリー スルーンN (20,790円)

ロットNo. A-02041~A-13426 対象台数: 計8,500台

【2】お客様のお問い合わせ先

コンビウェルネス お客様ご連絡窓口 0120-376001

(9:00~17:00 土日祝日を除く 携帯電話・PHSからも可能です)

(9月17日(土)~9月19日(月・祝)は受け付けします)

Press Information

【3】 対応策

コンビキャリー スルーン(正規製品)等へ製品交換対応させていただきます。

【4】 公表

9月14日(水) 全国紙に社告を掲載 (朝日・読売・毎日・日経)

同 ホームページによるお知らせ

<http://www.combi-wellness.co.jp/support/>

同 店頭告知+お客様向け告知文配布



「コンビキャリー スルーン」



「コンビキャリー スルーン」の
特徴：前輪に小さな補助車輪付き

* 本件に関するメディアからのお問い合わせ先 *

コンビ株式会社 経営企画室 広報 藤

Tel : 03 - 5828 - 7607

Fax : 03 - 5828 - 7662